
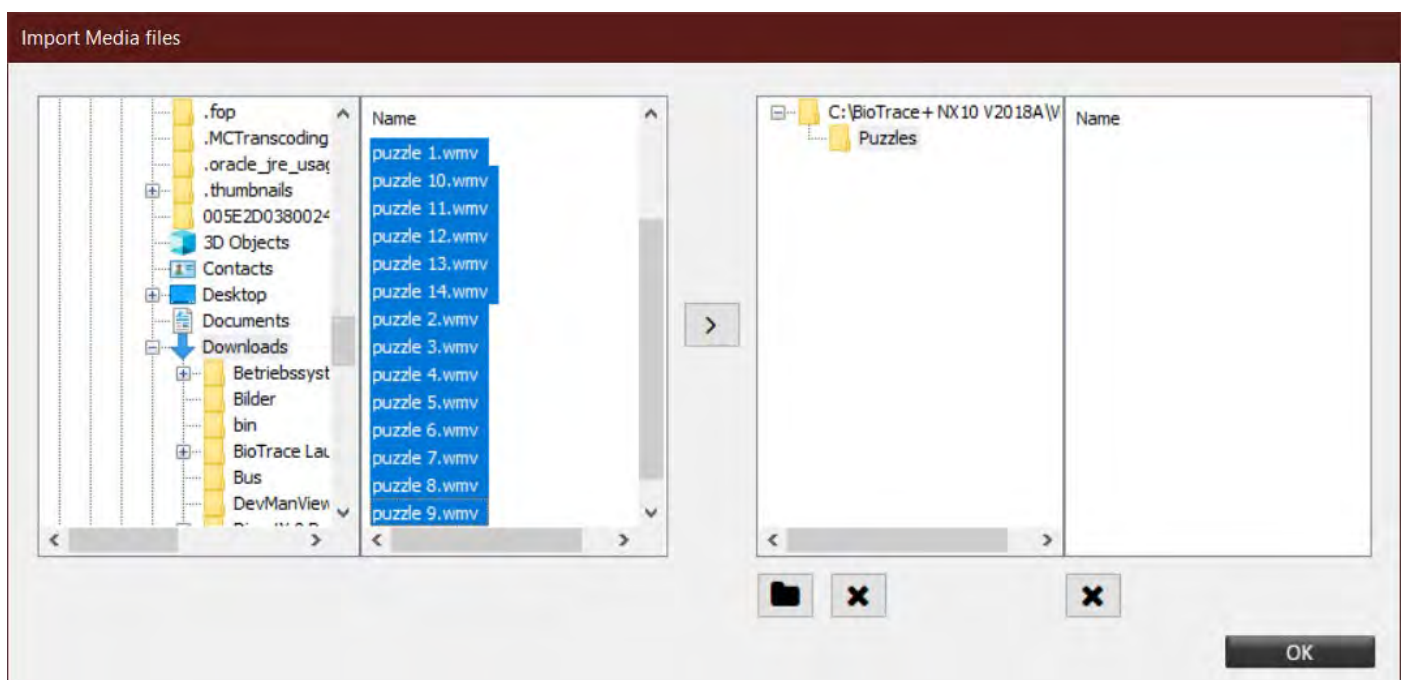



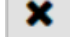
Puzzle und Spiele Videodateien in Software einfügen


Hier können Sie die Videodateien

herunterladen: <https://mindmedia.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000259184-puzzles-and-games-video-content>

Nach dem Download können Sie die Videos in die BioTrace+ Software einfügen. Ab V2017A finden Sie dazu unter „Datei“ und „Videodateien importieren“ einen Importdialog:

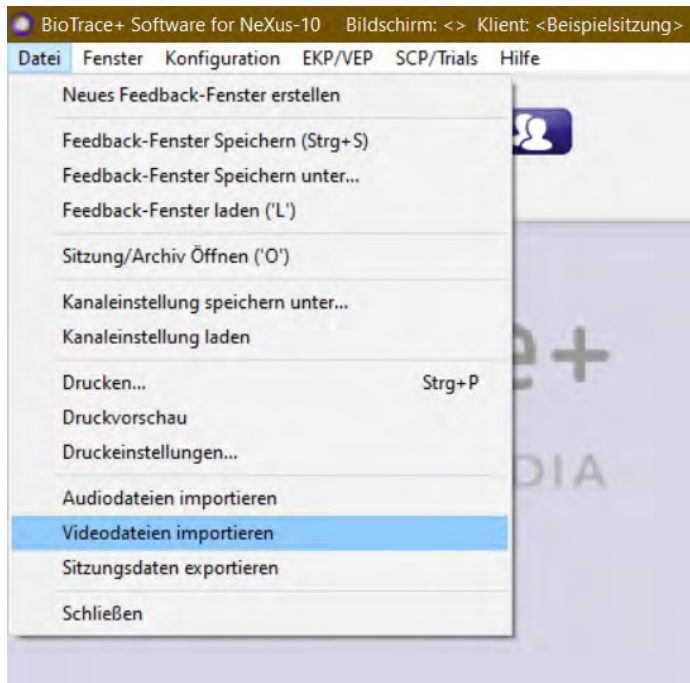


In diesem Dialog können Sie durch Klick auf  einen neuen Unterordner anlegen und über  Unterordner löschen.

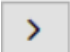
Markieren Sie die Dateien (mit gedrückter Strg- oder Umschalt-Taste können Sie mehrere Dateien markieren) und klicken Sie auf  um die Dateien in BioTrace zu kopieren.

Während des Kopiervorgangs reagiert die Oberfläche der Software nicht.

Für Versionen älter als V2017A klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die BioTrace+-Verknüpfung auf dem Desktop und klicken auf „Dateipfad öffnen“:

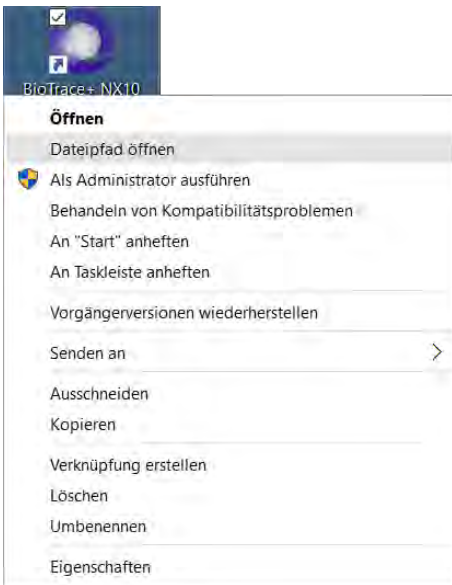

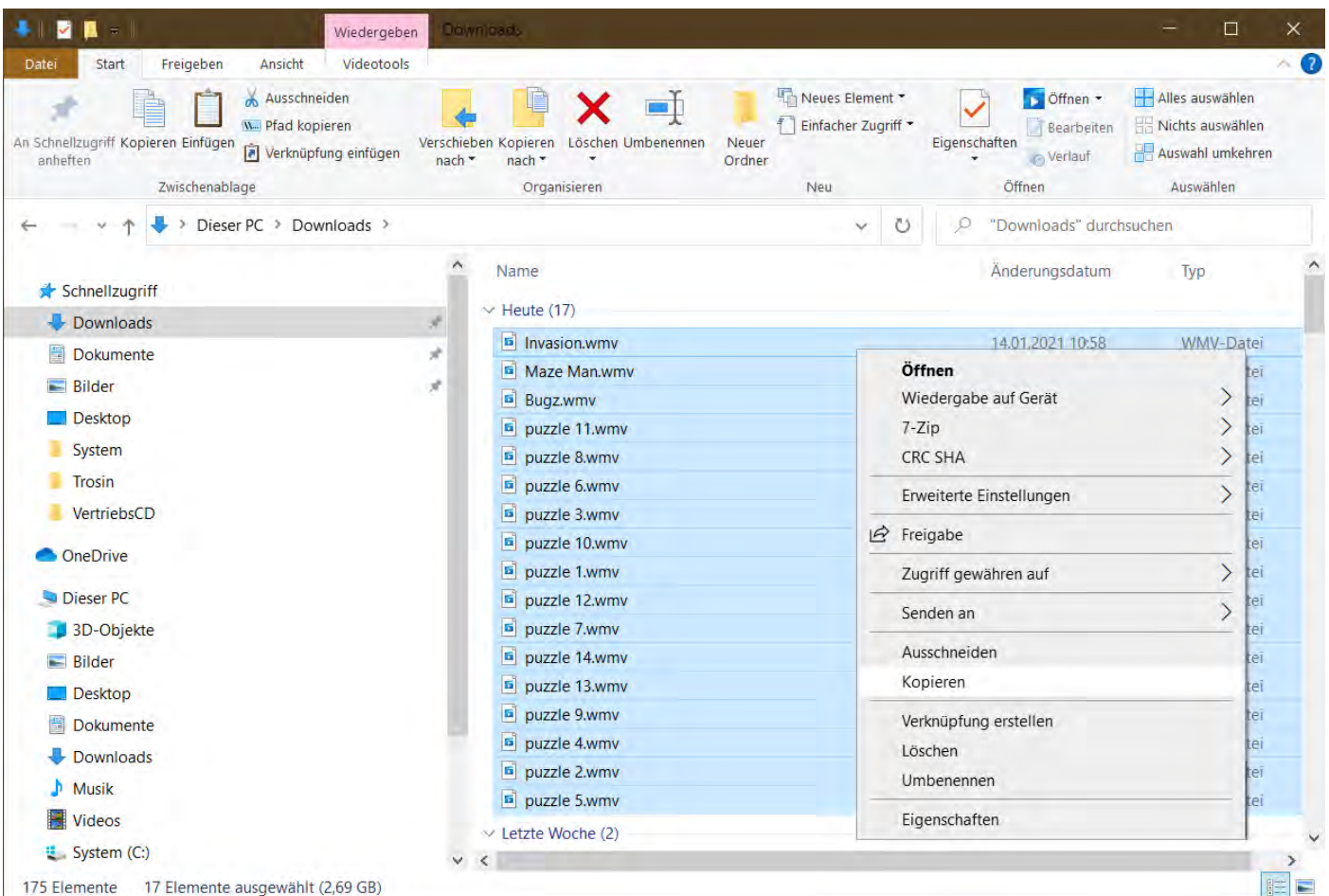



Öffnen Sie den Ordner, in dem die heruntergeladenen Dateien liegen, markieren Sie alle, klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an und klicken Sie auf kopieren:



Klicken Sie auf den BioTrace+-Ordner, suchen Sie den Ordner „Video“, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und klicken Sie auf „Einfügen“:

Windows Explorer window titled "BioTrace+ NX10" showing the file system structure. The "Video" folder is selected, and the context menu is open, highlighting "Einfügen".

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
PlugIns	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
Presentations	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
Protocols	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
Screens	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
System	14.01.2021 08:35	Dateiordner	
Textures	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
Tools	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
VEP	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
Video	14.01.2021 08:33	Dateiordner	
	11.03.2020 17:46	Anwendungserwei...	256 KB
	11.03.2020 17:46	Anwendung	6.084 KB
	11.03.2020 17:46	BIN-Datei	2.736 KB
	11.03.2020 17:46	Anwendung	80 KB
	11.03.2020 17:46	Anwendungserwei...	2.172 KB
	11.03.2020 17:46	Anwendungserwei...	2.270 KB
	14.01.2021 11:13	Textdokument	3 KB
	14.01.2021 09:01	Textdokument	14 KB
	11.03.2020 17:46	AX-Datei	64 KB

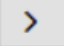Um die Puzzle- oder Spielevideos abzuspielen wählen Sie zunächst das Videofeedback , klicken dann auf Feedback anpassen  und schieben sie dann mit  die gewünschten Puzzles oder Spiele in die Liste der Ausgewählten Videos, löschen Sie Videos, die nicht abgespielt werden sollen mit :

Videodateien auswählen

Verfügbare Videodateien

Ausgewähltes Video

Loop-Nature-1.wmv

Endloswiedergabe Zufallsliste Always play

Apply OK Abbruch

Current video: Loop-Nature-1.wmv

00'26" [00'58"]

Bestätigen Sie die Änderung mit „OK“.