

HASOMED

RehaCom<sup>®</sup>



Nutzerhandbuch

# Inhalt

Fragen, Bestellungen, Anregungen.....	3
Systemvoraussetzungen.....	3
Sprachen.....	4
FAQ - Häufig gestellte Fragen .....	5
Installation a) per DVD .....	6
Installation b) per Downloaddatei (ISO) .....	7
Die ersten Schritte in RehaCom .....	13
Lizenzierung .....	14
Übersicht RehaCom Hauptbildschirm .....	18



# Fragen, Bestellungen, Anregungen

Wir sind für Sie da.

Montag - Donnerstag: 8 - 17 Uhr, Freitag: 8 - 16 Uhr

Tel: +49 (0)391 61 07 630

Mail: [medizintechnik@hasomed.de](mailto:medizintechnik@hasomed.de)

Web: [www.rehacom.de](http://www.rehacom.de)

## Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i3, i5, i7 der 6. Generation  
oder gleichwertig

Arbeitsspeicher: 4 GB Ram

Grafikkarte: DirectX 10.1, Intel HD530 oder höher  
(mind. 2 GB Grafikspeicher)

Festplatte: 10 GB frei

Soundkarte: vorhanden

Monitor: minimale Auflösung für Schriftgröße (100 %) ist  
1024 x 768 px

DVD-Laufwerk: zur Installation der Software (alternativ über  
USB/Netzwerk oder per Download)

### Zusätzliche Hardware

Drucker: Ausdruck z.B. Therapieergebnisse, Leistungsbericht

Keyboard: RehaCom Keyboard zur Erleichterung der Bedienung  
für Nutzer mit motorischen Einschränkungen

# Sprachen



Deutsch  
Englisch  
Französisch  
Spanisch  
Portugiesisch  
Italienisch  
Griechisch  
Schwedisch  
Finnisch

Dänisch  
Niederländisch  
Belgisch (Niederl.)  
Russisch  
Polnisch  
Tschechisch  
Slowenisch  
Ungarisch  
Lettisch

Litauisch  
Chinesisch simplified  
Chinesisch traditional  
Koreanisch  
Japanisch  
Türkisch  
Arabisch  
Hebräisch  
Farsi


(nicht alle Module in allen Sprachen verfügbar)



# Installation a) per DVD

Legen Sie die Installations-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Rechners. Bei eingeschalteter Autostartfunktion öffnet sich selbstständig das Fenster „Automatische Wiedergabe“.

1  
a

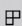 **DVD-Laufwerk (D:) RehaCom 6.9.0.0**  
Wählen Sie eine Aktion für diesen Datenträger aus.

„Automatische Wiedergabe“

Klicken Sie auf „SETUP.EXE ausführen“.

2  
a

DVD-Laufwerk (D:) RehaCo...

Wählen Sie eine Aktion für diesen Datenträger.

**Programm von Medium installieren oder ausfüh...**



SETUP.EXE ausführen  
Veröffentlicht von HASOMED Hard- und So...

**Weitere Optionen**



Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen  
Explorer



Keine Aktion durchführen


„Automatische Wiedergabe“

Sollte die Autostart Funktion Ihres Computers deaktiviert sein öffnen Sie „Computer“ bzw. „Dieser PC“ per Doppelklick. Es werden alle auf dem Datenträger vorhandenen Inhalte angezeigt. Suchen Sie darin die Anwendung „Setup“ und starten Sie sie über einen Doppelklick.

Weiter mit Schritt 3 der Installation. (Seite 8)

# Installation b) per Downloaddatei (ISO)


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Datei „RehaCom6.10-DE-Hasomed“ und auf „Bereitstellen“.

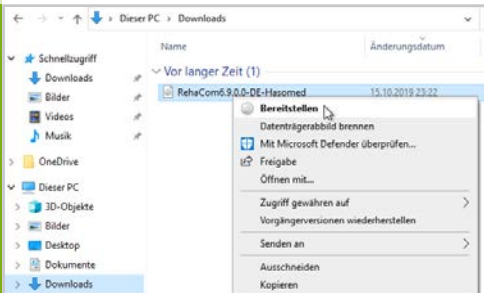

„Downloads“


1  
b

Wenn diese Option nicht besteht, zeigen Sie auf „Öffnen mit“ und klicken auf „Windows-Explorer“.

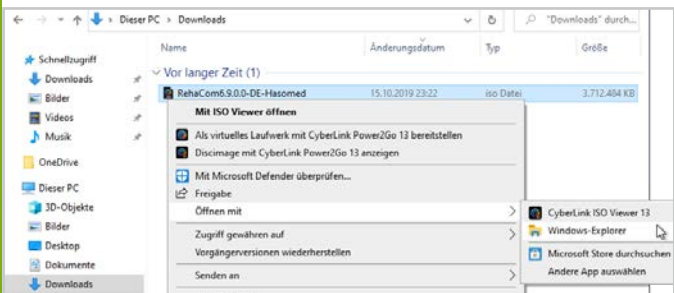


2  
b

Es öffnet sich ein Ordner. Suchen Sie darin die Anwendung „Setup“ und starten Sie sie über einen Doppelklick.

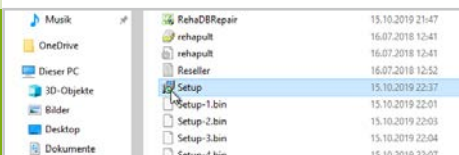

Klicken Sie bei der Nachfrage der Benutzerkontensteuerung auf „Ja“, um die Installation zu genehmigen.


3

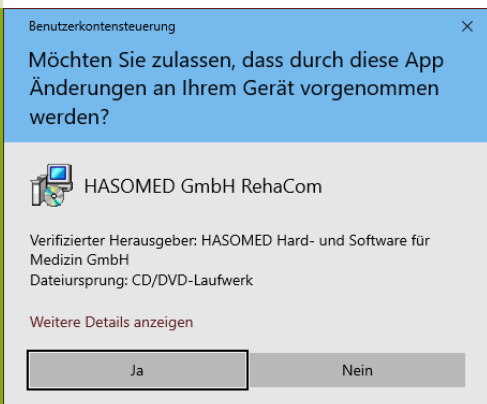

„Benutzerkontensteuerung“

Es öffnet sich das Fenster „Setup-Sprache auswählen“. Passen Sie bei Bedarf die Sprache an und klicken Sie anschließend auf „OK“.

4

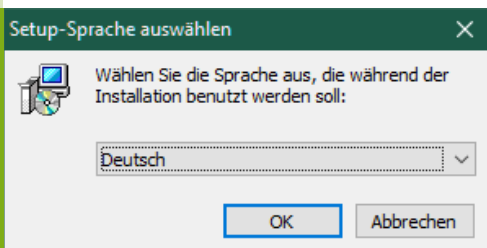

„Setup-Sprache auswählen“



Das Fenster „Setup - RehaCom“ öffnet sich. Klicken Sie auf „Weiter“.


5



„Setup - RehaCom  
- Setup Assistent“

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Zum fortsetzen der Installation setzen Sie den Punkt bei „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und bestätigen Sie mit klicken auf „Weiter“.


6

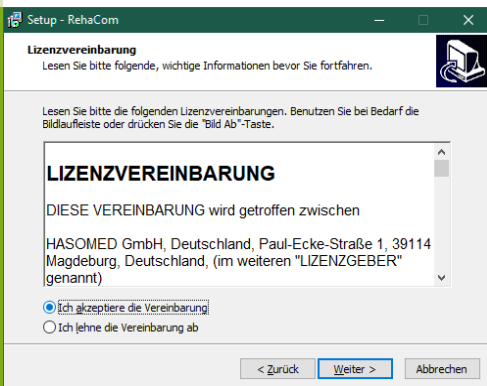

„Setup - RehaCom  
- Lizenzvereinbarung“

Im folgenden Fenster erscheint die Dateinschutzklärung. Lesen Sie diese. Um fortzufahren setzen Sie den Punkt bei „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und bestätigen Sie mit klicken auf „Weiter“.


7

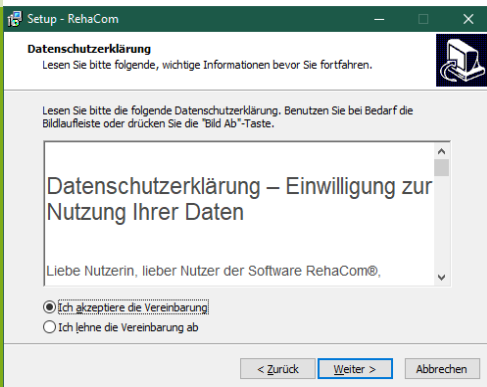

„Setup - RehaCom  
- Datenschutzerklärung“

Im folgenden Fenster können Sie den Ziel-Ordner wählen. Bei Bedarf ändern Sie das Installations-Ziel und klicken anschließend auf „Weiter“.


8

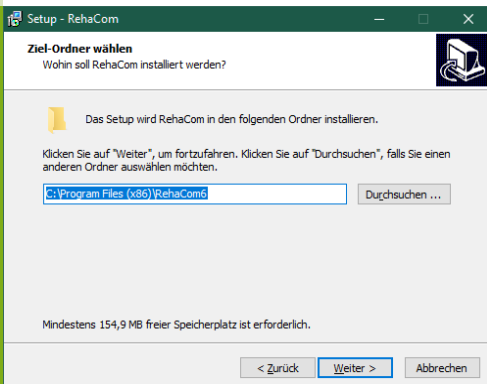

„Setup - RehaCom  
- Installationsziel  
wählen“

Nun können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen. Wählen Sie in der Auswahlliste „Standard“, um RehaCom vollständig zu installieren. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.


9

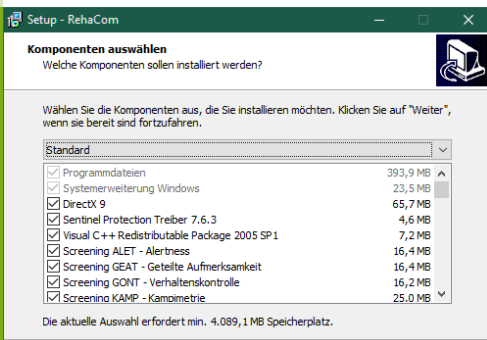

„Setup - RehaCom  
- Komponenten  
wählen“


Im abschließenden Fenster erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Installationsparameter. Überprüfen Sie diese und klicken Sie auf „Installieren“.

10

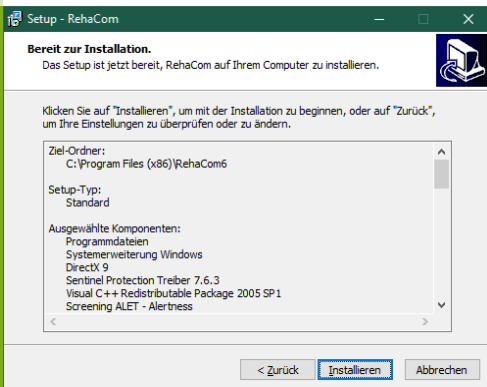


„Setup - RehaCom  
- Zusammenfassung“

RehaCom wird nun installiert.

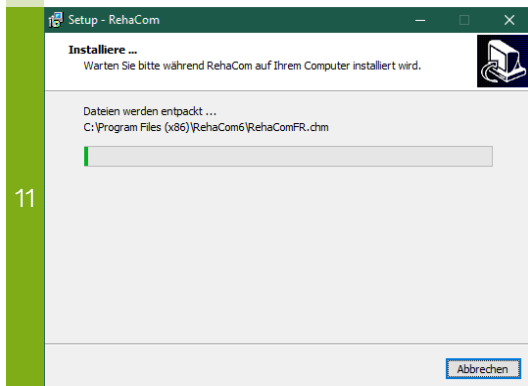

„Setup - RehaCom  
- Installation“

Falls die Windows-Komponente .NET Framework 3.5 noch nicht installiert ist, wird sie während der Installation von RehaCom angefordert. Klicken Sie auf „Feature herunterladen und installieren“ um (die Komponente zu Windows hinzuzufügen) fortzufahren.“

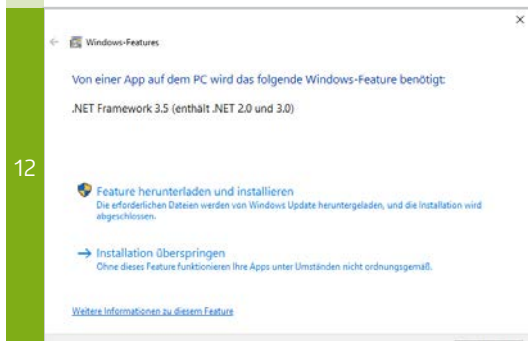


„Windows-Komponente .NET Framework“

# Die ersten Schritte in RehaCom

Besitzen Sie ein RehaCom Patiententastatur oder einen RehaCom-Dongle, schließen Sie diese(n) bitte vor dem Start von RehaCom an den Computer an. Nach der Installation können Sie RehaCom starten.

Beim ersten Start von RehaCom erscheint das Fenster „Benutzermodus“. Wählen Sie den Modus in dem Sie arbeiten möchten aus und schließen Sie das Fenster.

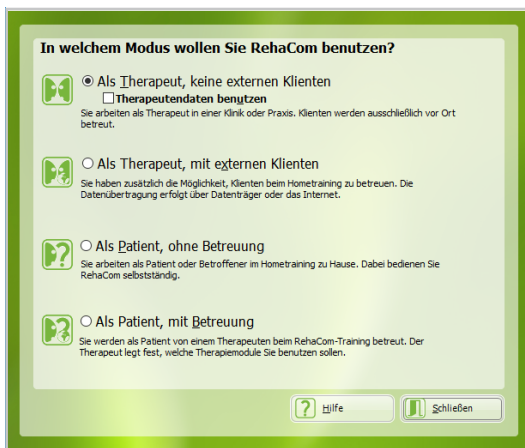

„Benutzermodus“

Nach Auswahl des Benutzermodus werden Sie aufgefordert, einen neuen Klienten anzulegen. Klicken Sie hierzu im RehaCom-Hauptbildschirm auf den Schalter „Klienten“. In dem sich öffnenden Fenster können Sie Klientendaten eingeben. Später können Sie über diesen Schalter neue Klienten anlegen und bestehende verwalten. Wenn noch kein Klient angelegt ist, öffnet sich sofort die Maske zum Anlegen eines neuen Klienten.

# Lizenzierung

Um RehaCom vollständig nutzen zu können, ist die Eingabe eines Lizenzcodes notwendig. Diesen finden Sie nach Erwerb auf Ihrem Lieferschein bzw. Ihrer Rechnung. Wenn Sie ein Internet-Konto nutzen möchten, halten Sie sich bitte an die nachfolgende Instruktion. Falls Sie ein RehaCom Keyboard oder einen RehaCom-Dongle haben, lesen Sie auf Seite 16 weiter.

## Lizenzierung über ein Internet-Konto:

Achten Sie darauf, dass der Lizenzierungsmodus auf „Lizenzierung über das Internet“ eingestellt ist. Klicken Sie hierzu im RehaCom-Hauptbildschirm auf „System“ und anschließend auf „Lizenzierungsmodus“.

**RehaCom Lizenzierung**

**Lizenzierung auf Ihrem Computer**  
RehaCom wird auf den Computer lizenziert, den Sie gerade benutzen. Der RehaCom Lizenzschlüssel wird passend zu Ihrem Windows Lizenzschlüssel erzeugt. Die Lizenz kann nicht auf einen anderen Computer übertragen werden.

**Lizenzierung über Patiententastatur oder Dongle**  
Das Training mit der Patiententastatur oder Dongle ist die bevorzugte Trainingsmethode für Therapieklinik oder neuropsychologische Praxis. Die Therapieprogramme werden meist mittels RehaCom Patienten-Tastatur bedient.

**Lizenzierung über Lizenz-Server**  
Die Lizenzierung der RehaCom-Module erfolgt über einen Lizenz-Server in der Einrichtung. Lizenzen werden so zentral verwaltet. Auf einem zentralen Server muss ein Lizenzierungsmodul installiert sein. Erfagen Sie bei ihrem EDV-Fachmann Servername und Portnummer.  
Server-Name:  Port:

**Lizenzierung über das Internet**  
Die Lizenzierung über das Internet ist die bevorzugte Methode für das Heim-Training. Eine spezielle Patiententastatur ist nicht notwendig.

„Lizenzierungsmodus“

Um die Einrichtung von RehaCom abzuschließen, wählen Sie den Lizenzierungsmodus aus. Klicken Sie hierzu im RehaCom-Hauptbildschirm auf „System“ und dann auf „Lizenzierung“ (nähere Informationen finden Sie auf Seite 16). Sie können den Benutzermodus und den Lizenzierungsmodus jederzeit ändern.

Anschließend können Sie neue Therapeuten bzw. Klienten erstellen, die sich über das Internet registrieren. Klicken Sie hierzu im RehaCom-Hauptbildschirm auf „Therapeut“ bzw. „Klient“ und erstellen Sie einen Therapeuten bzw. Klienten über die Taste „Neu“ bzw. ändern einen vorhandenen Therapeuten über die Taste „Bearbeiten“. Setzen Sie das Häkchen im Feld „Lizenzierung über das Internet“ und füllen Sie die grün unterlegten Felder aus. Überprüfen Sie Ihre Eingaben und klicken Sie anschließend auf „OK“.

The screenshot shows a registration form with the following fields and controls:

- Titel
- Name
- Vorname
- Klinik / Praxis
- Station / Abteilung
- Im Internet registrieren
- Anschrift / Strasse
- PLZ, Ort
- Region (dropdown menu)
- Telefon
- Bezeichnung
- E-Mail
- Benutzername Internet
- Passwort
- Passwort Wiederholung
- Buttons:  OK,  Abbrechen,  Hilfe

„Therapeut Neu“

**TIPP:** Notieren Sie sich Ihr Passwort und heben Sie es gut auf.

## Lizenzierung über RehaCom Keyboard oder RehaCom-Dongle:

Achten Sie darauf, dass das RehaCom Keyboard bzw. der RehaCom-Dongle an den Computer angeschlossen ist. Der Lizenzierungsmodus muss auf „Lizenzierung über Patiententastatur oder Dongle“ eingestellt sein. Klicken Sie hierzu im RehaCom-Hauptbildschirm auf „System“ und anschließend auf „Lizenzierungsmodus“.

**RehaCom Lizenzierung**

Lizenzierung auf Ihrem Computer  
RehaCom wird auf den Computer lizenziert, den Sie gerade benutzen. Der RehaCom Lizenzschlüssel wird passend zu Ihrem Windows Lizenzschlüssel erzeugt. Die Lizenz kann nicht auf einen anderen Computer übertragen werden.

Lizenzierung über Patiententastatur oder Dongle  
Das Training mit der Patiententastatur oder Dongle ist die bevorzugte Trainingsmethode für Therapieklinik oder neuropsychologische Praxis. Die Therapieprogramme werden meist mittels RehaCom Patienten-Tastatur bedient.

Lizenzierung über Lizenz-Server  
Die Lizenzierung der RehaCom-Module erfolgt über einen Lizenz-Server in der Einrichtung. Lizenzen werden so zentral verwaltet. Auf einem zentralen Server muss ein Lizenzierungsmodul installiert sein. Erfagen Sie bei Ihrem EDV-Fachmann Servername und Portnummer.

Server-Name:  Port:

Lizenzierung über das Internet  
Die Lizenzierung über das Internet ist die bevorzugte Methode für das Heim-Training. Eine spezielle Patiententastatur ist nicht notwendig.

„Lizenzierungs-  
modus“

Zur Eingabe des Lizenzcodes klicken Sie im gleichen Fenster auf den Button „Lizenzen“. Tragen Sie den Lizenzcode in die Eingabezeile ein. Falls Sie eine Lizenz-Datei haben, klicken Sie auf den Button „CodeDisk“ (der Lizenzcode erscheint dann in der Eingabezeile). Nach der Eingabe des Codes klicken Sie bitte auf „Übernehmen“.



Folgende RehaCom-Module sind für Ihr System lizenziert: Lizenzierung auf RehaCom-ID **30016**

Name Modul	Ist Zeitk.	Verbl. Zeit	Lizenz-Code	Lizenzdatum	Benutzt durch	Benutzt bis
GLDB	Ja	0 Std., 0 Min.		22.08.2016		frei
ALFM	Nein	> 21 Tage	3F5E-7AFF-2CB-26CB-670D-96-409A	12.09.2017		frei
GEAU	Nein	> 21 Tage	9D4F-AS7-2D1-26CB-6760-8C-74BC	12.09.2017		frei
VIGI	Nein	> 21 Tage	ADP0-6598-2C2-26CB-6780-9F-CD2F	12.09.2017		frei
MEMO	Nein	> 21 Tage	7D41-6981-2CF-26CB-67AD-92-C4C7	12.09.2017		frei
GESI	Nein	> 21 Tage	8D31-6598-2D1-26CB-67CD-8C-6A94	12.09.2017		frei
ETHK	Nein	> 21 Tage	530E-704D-2D3-26CB-673D-8E-3F8F	12.09.2017		frei
WORT	Nein	> 21 Tage	6432-406E-2FB-26CB-618D-A6-DC7D	12.09.2017		frei
AKRE	Nein	> 21 Tage	3DF8-6037-2D1-26CB-677D-8C-1CB7	12.09.2017		frei
BSD	Nein	> 21 Tage	43D1-44DE-2D4-26CB-64F0-88-70A2	12.09.2017		frei

Bitte geben Sie einen Lizenzcode ein:

Übernehmen    Angebot anfordern    Verbrauch

CodeDisk    Kaufen im Internet    Hilfe

Lizenzierungs-Modus    Schließen

Fenster „Lizenzen“

# Übersicht RehaCom Hauptbildschirm

Therapeut Klient Module Parameter Start Ergebnisse System Hilfe

HASOMED  
**RehaCom**<sup>®</sup>  
Kognitive Therapie und Hirnleistungstraining

(c)1992-2015 / all rights reserved

Therapeuten  
Klienten  
Module  
Parameter  
Ergebnisse

Aktueller Therapeut: Dr. Thomas, Smith  
Aktueller Klient: Miller, Henry, 08.03.1952

Training Screening  
Sortieren nach Nutzungshäufigkeit

Gruppe  
Module des Klienten  
alle Module  
Aufmerksamkeit  
Gedächtnis  
Exekutivfunktionen  
Gesichtsfeld  
Visuomotorik  
Berufliche Rehabilitation

Module  
Alertnesstraining  
Arbeitsgedächtnis  
Aufmerksamkeit und Konzentration  
Gesichtsgedächtnis  
Geteilte Aufmerksamkeit 2  
Plan a Holiday  
Reaktionsverhalten  
Sakkadentraining

Hilfe  
System  
Schließen  
Modul Non-Stop  
Start

- 1 **Menüleiste** Einstellmöglichkeiten zum gesamten Programm
- 2 **Therapeuten** neue Therapeuten anlegen und bestehende verwalten
- 3 **Klienten** neue Klienten anlegen und bestehende verwalten

- 4 Module** bestimmte Module einem Klienten zuweisen und Modulbatterien erstellen
- 5 Parameter** spezifische Parameter einstellen (zugehörig zum gewählten Modul in **14**)
- 6 Ergebnisse** Trainingsergebnisse aller klientenbezogenen Module anzeigen
- 7 Hilfe** nützliche Hilfen und Tipps für das gesamte Programm
- 8 System** Administration von Lizenzierungs-, Benutzer-, Patientenmodus, Netzwerk, Datensicherung etc.
- 9 Schließen** beenden von RehaCom
- 10 aktueller Therapeut**  
aktuellen Therapeuten oder Administrator auswählen
- 11 aktueller Klient**  
aktuellen Klienten auswählen
- 12 Training & Screening**  
wechseln zwischen Trainings- und Screening-Modulen
- 13 Gruppe** Liste der Trainingsgruppen bzw. Screening-Module
- 14 Module** Liste der Trainings-Module
- 15 Modul Non-Stop**  
startet das Training sofort (ohne Therapeutenmenü)
- 16 Start** Starten des ausgewählten Trainings-/ Screeningmoduls

Wir beraten Sie gern.  
+49 (0)391 6107-630