



1. Öffnen Sie den Download-Ordner auf Ihrem Computer
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Datei „RehaCom6.10.*.o-DE-Hasomed-Patient“ und auf „Bereitstellen“

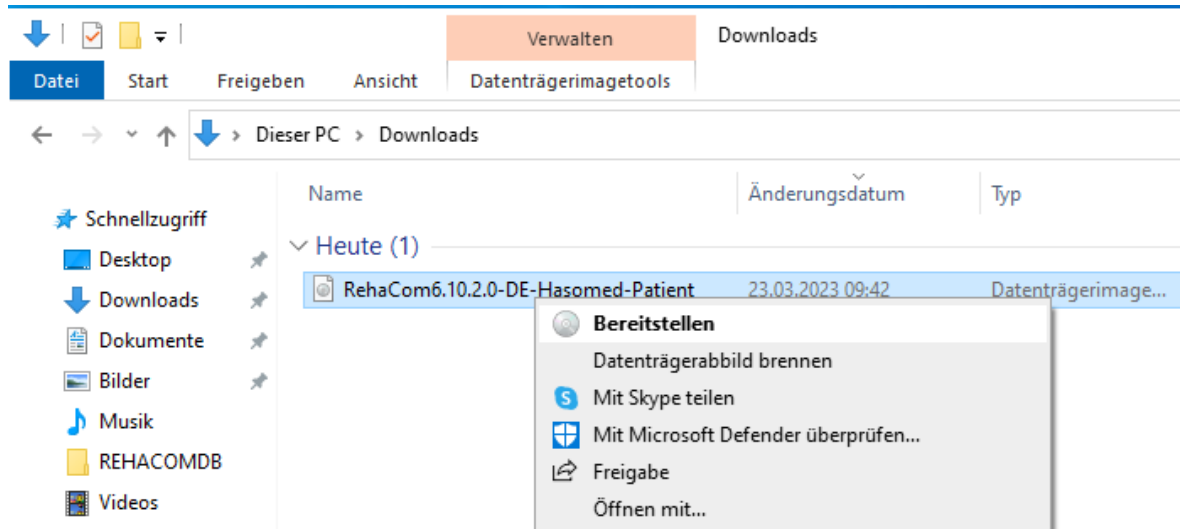


- b. Wenn diese Option nicht besteht, zeigen Sie auf „Öffnen mit“ und klicken auf „Windows Explorer“.

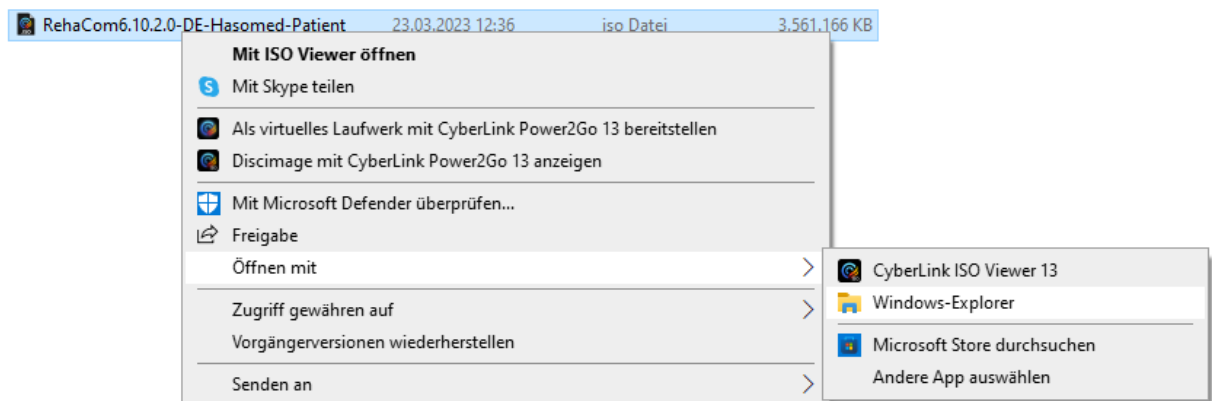


2. Es öffnet sich ein Ordner. Suchen Sie darin die Anwendung „Setup“ und starten Sie sie über einen Doppelclick.

Name	Datum	Typ	Größe
RehaDBInstallfr	22.04.2021 13:48	Textdokument	4 KB
RehaDBRepair	02.02.2022 23:44	Anwendung	2.679 KB
rehapult	22.04.2021 14:11	Sicherheitskatalog	12 KB
rehapult	22.04.2021 14:11	Setup-Informatio...	14 KB
Reseller	22.04.2021 14:10	Textdokument	1 KB
Setup	03.02.2022 00:47	Anwendung	1.460 KB
Setup-1.bin	03.02.2022 00:03	BIN-Datei	242.691 KB
Setup-2.bin	03.02.2022 00:05	BIN-Datei	244.141 KB
Setup-3.bin	03.02.2022 00:07	BIN-Datei	244.141 KB
Setup-4.bin	03.02.2022 00:09	BIN-Datei	244.141 KB
Setup-5.bin	03.02.2022 00:11	BIN-Datei	244.141 KB

3. Klicken Sie bei der Nachfrage der Benutzerkontensteuerung auf „Ja“, um die Installation zu genehmigen.

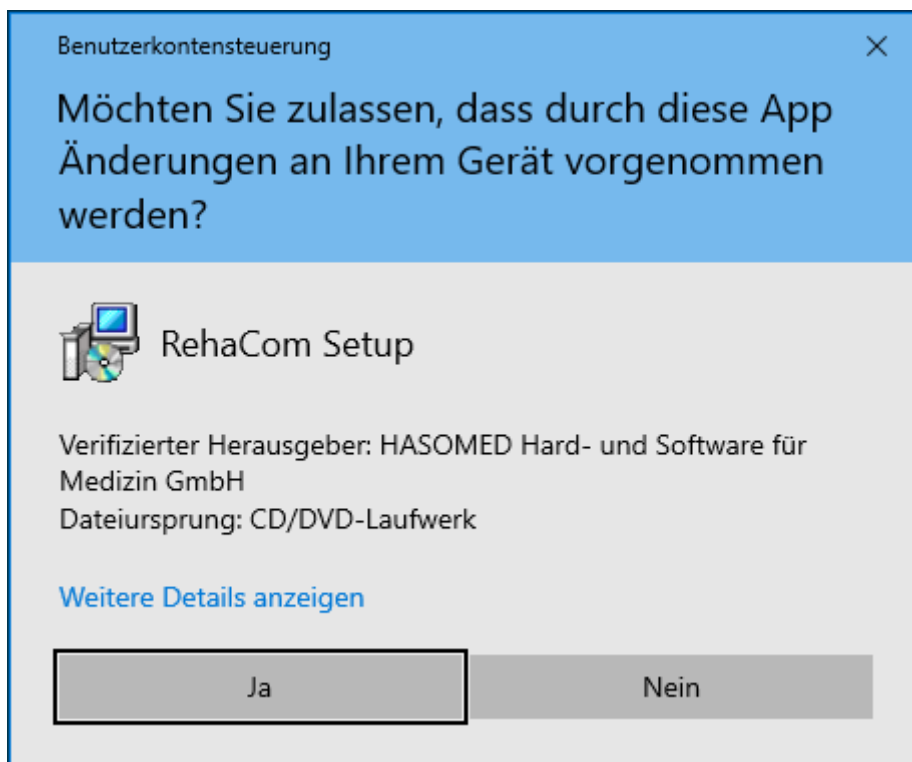


- Es öffnet sich das Fenster „Setup-Sprache auswählen“. Passen Sie bei Bedarf die Sprache an und klicken Sie anschließend auf „OK“

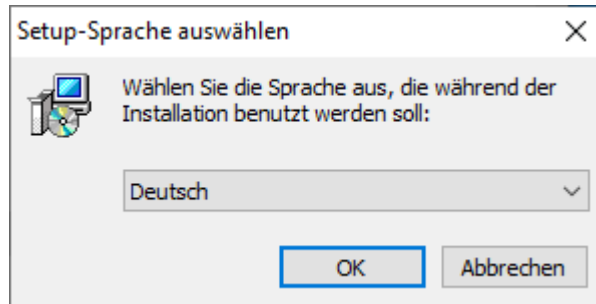


- Das Fenster „Setup - RehaCom“ öffnet sich. Klicken Sie auf „Weiter“




- Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Zum Fortsetzen der Installation setzen Sie den Punkt bei „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und bestätigen Sie mit klicken auf „Weiter“.

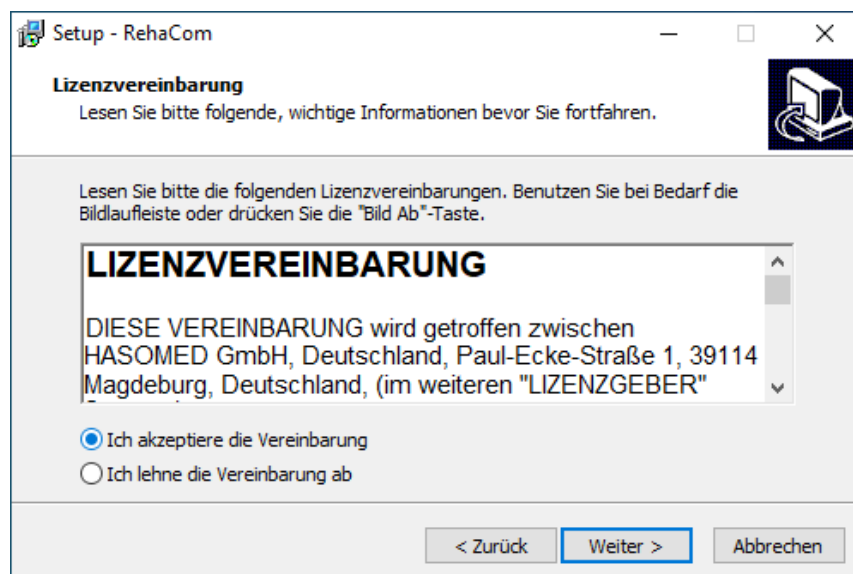


7. Im folgenden Fenster erscheint die Datenschutzerklärung. Lesen Sie diese. Um fortzufahren, setzen Sie den Punkt bei „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und bestätigen Sie mit klicken auf „Weiter“

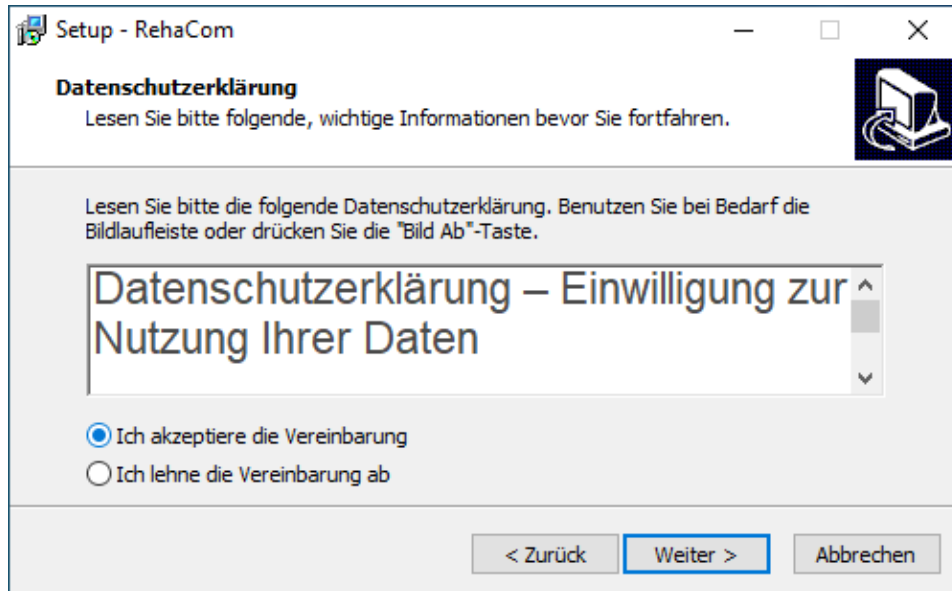


8. Im folgenden Fenster können Sie den Ziel-Ordner wählen. Bei Bedarf ändern Sie das Installations-Ziel und klicken anschließend auf „Weiter“

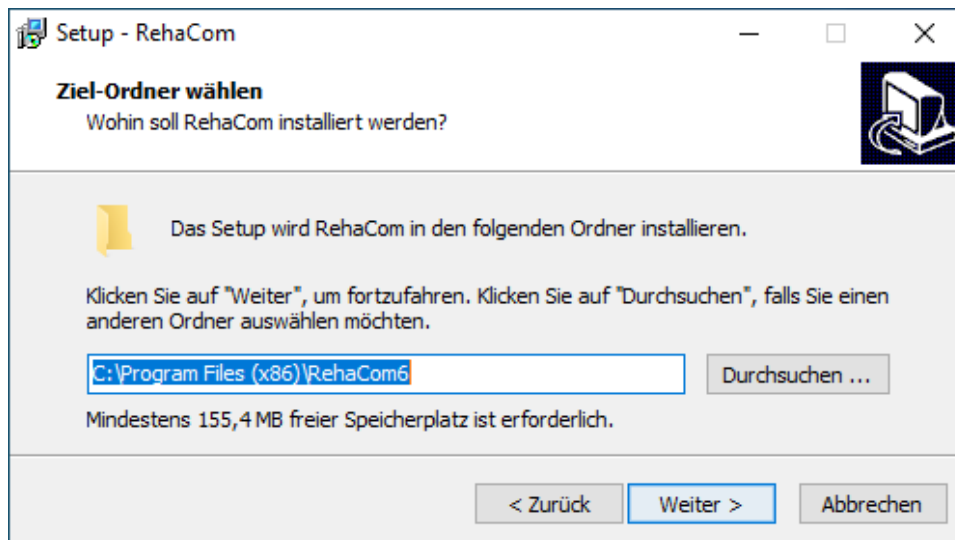


9. Nun können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen. Wählen Sie in der Auswahlliste „Standard“, um RehaCom® vollständig zu installieren. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

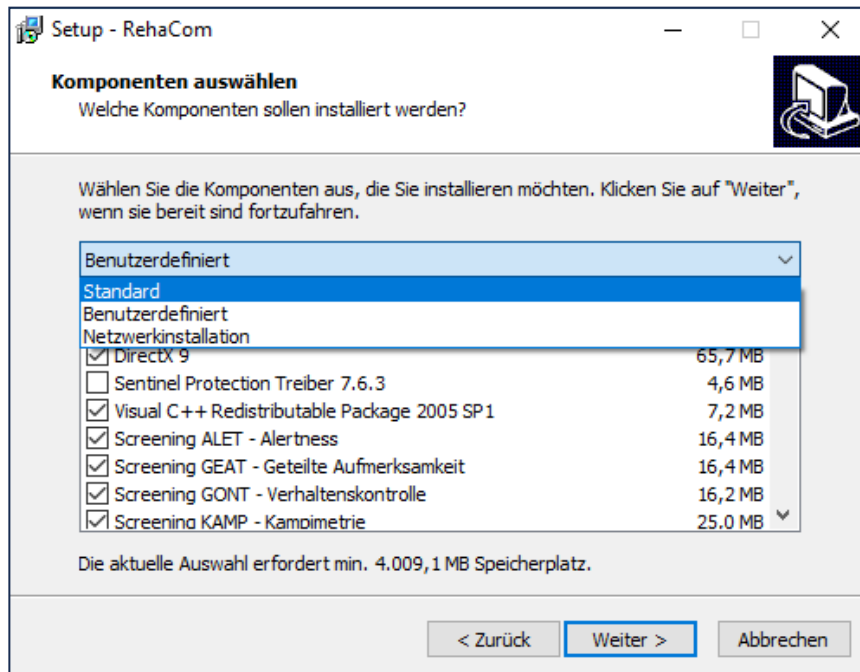


10. Im abschließenden Fenster erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Installationsparameter. Überprüfen Sie diese und klicken Sie auf „Installieren“.

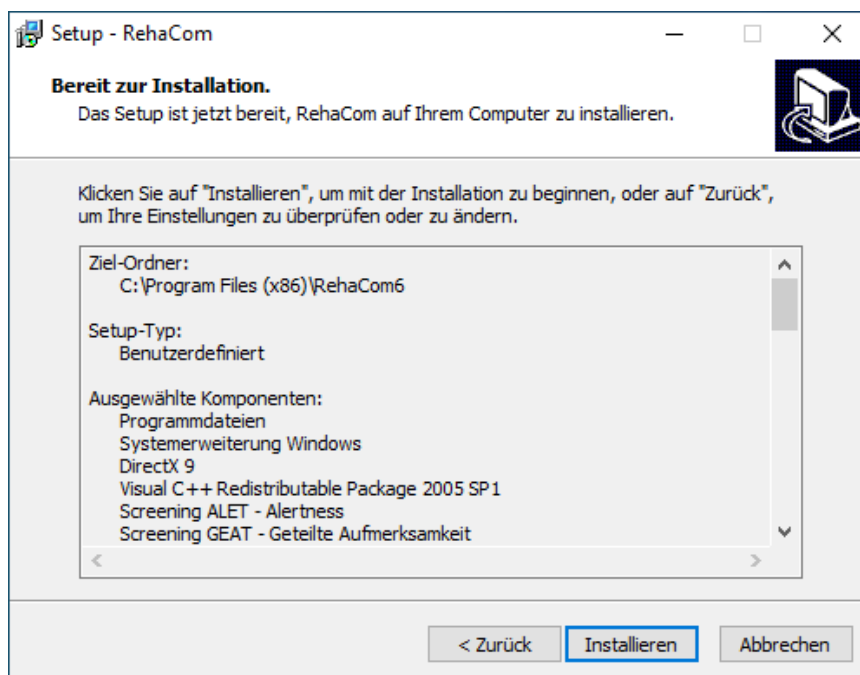

11. RehaCom® wird nun installiert.

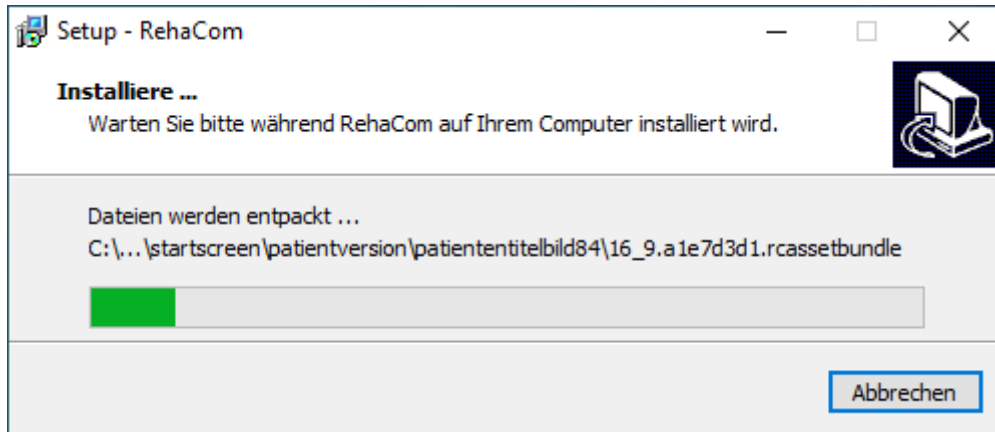


12. Falls die Windows-Komponente .NET Framework 3.5 noch nicht installiert ist, wird sie während der Installation von RehaCom® angefordert. Klicken Sie auf „Feature herunterladen und installieren“ um die Komponente zu Windows hinzuzufügen.

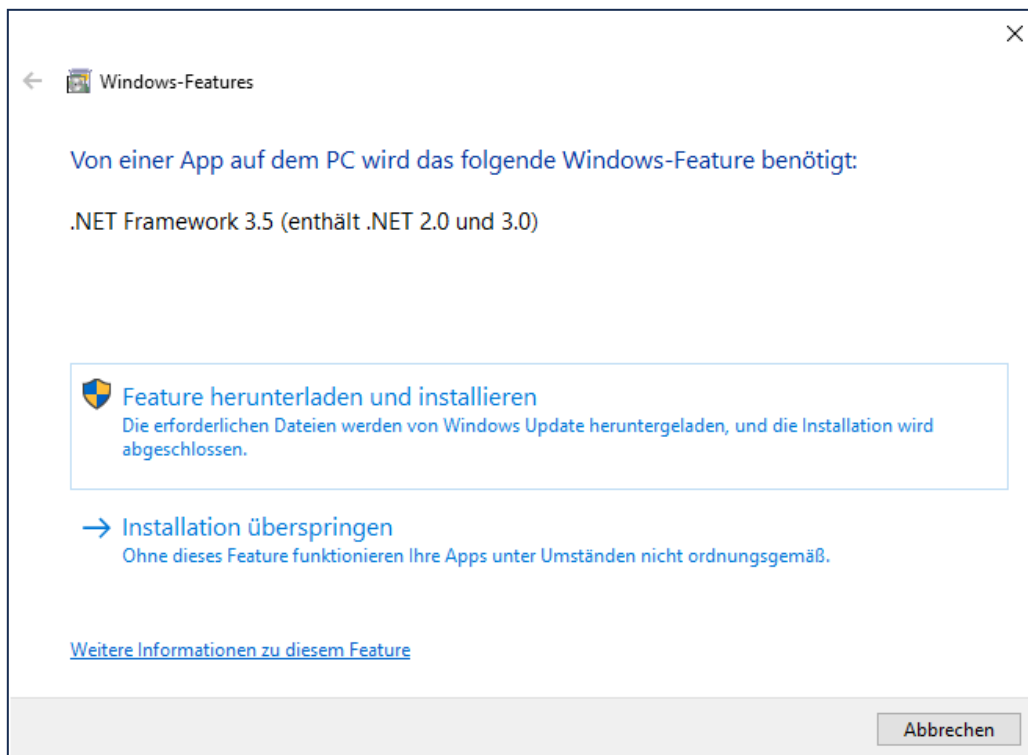


13. Starten Sie RehaCom® über das RehaCom®-Symbol auf Ihrem Desktop, indem Sie mit der Maus doppelklicken.



14. Wählen Sie den Benutzermodus „Als Patient, ohne Betreuung“ und klicken Sie auf „Schließen“.

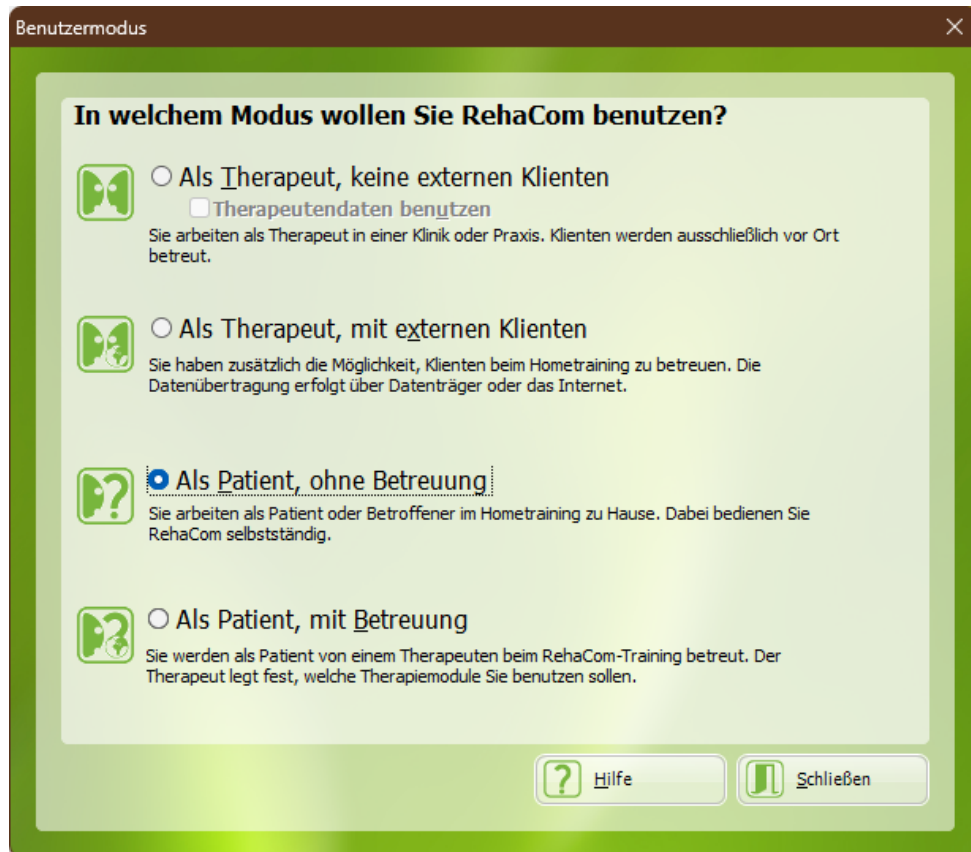


15. Klicken Sie auf „System“ und „Lizenzierungsmodus“

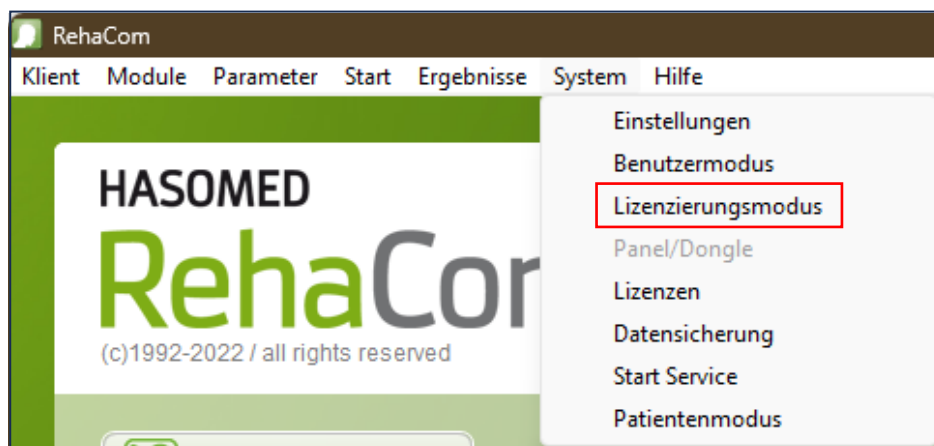


16. Wählen Sie „Nein, Lizenzierung soll ohne Gerät erfolgen“

Lizenzierungsmodus

 Wollen Sie die RehaCom Patiententastatur oder einen Dongle zur Lizenzierung benutzen?

Wenn Sie die Patiententastatur oder einen Dongle zu Lizenzierung benutzen wollen, muss das Gerät JETZT an den Computer angeschlossen sein!

 Wenn Sie sich unsicher sind, wählen Sie "Nein" und lesen die Hilfe im nachfolgenden Fenster.

17. Damit sind die Probelizenzen freigeschaltet. Klicken Sie auf Schließen und legen Sie sich unter „Klienten“ an, um RehaCom® zu testen.